



Robust und sofort einsatzbereit

Philips HeartStart FRx Defibrillator Zubehör und Verbrauchsmaterial

PHILIPS

Koffer/Tragetasche für den HeartStart FRx

Der HeartStart FRx Defibrillator kann in der FRx Tasche oder im Hartschalenkoffer aufbewahrt werden.



FRx Tasche

Produktnummer 989803139251

Die robuste FRx Tasche aus pflegeleichtem Urethan hält Stößen und Stürzen stand und lässt sich mit einem Klettverschluss (VELCRO®) schnell öffnen. Sie bietet ausreichend Platz für den FRx Defibrillator und die Kurzanleitung sowie für optionales Zubehör wie eine Ersatzbatterie, Ersatz-Pads oder den Kinderschlüssel. Mit Tragegurt.

Abmessungen:

24,1 x 20,3 x 12,7 cm (B x H x T)



Hartschalenkoffer

Produktnummer YC

Der wasserdichte Koffer aus Hartschalenkunststoff eignet sich für den Einsatz unter hohen Belastungen, wie z.B. im Freien bei Nässe. Auch eine Ersatzbatterie, eine Kassette mit Ersatz-Pads und der Inhalt des Notfall-Sets finden in diesem Koffer Platz.

Abmessungen:

34 x 30 x 15 cm (B x H x T)

Wandhalterungen

Mit Philips Wandhalterungen und Defibrillatorschränken können Defibrillatoren strategisch so positioniert werden, dass sie in einem Notfall schnell zugänglich sind.



Wandhalterung

Produktnummer 989803170891

Die Wandhalterung wurde speziell für Philips HeartStart Defibrillatoren und das entsprechende Zubehör entwickelt. Die Defibrillatortasche wird in die Wandhalterung eingesetzt und mit einem Sicherheitsband (M3859A) gegen Missbrauch gesichert. Ein durchtrenntes Sicherheitsband weist darauf hin, dass der Defibrillator aus der Wandhalterung entnommen wurde und das Defibrillator-Zubehör eventuell ergänzt werden muss. Das Notfall-Set (68-PCHAT) lässt sich einfach hinter der Defibrillatortasche verstauen.

Abmessungen:

27 x 20 x 17 cm (B x H x T)

Gewicht: 0,52 kg



Sicherheitsband für Wandhalterung

Produktnummer M3859A



AED-Schilder


Produktnummer 989803170901 (rot)

Produktnummer 989803170911 (grün/DIN)

Durch das Anbringen eines AED-Schildes über jedem öffentlich zugänglichen AED wird die Aufmerksamkeit auf den AED gelenkt. Durch leicht verständliche Bilder werden Passanten darauf aufmerksam gemacht, wie ein AED im Notfall zu verwenden ist. Diese Schilder sind hervorragend geeignet für Bürogebäude, Sportvereine, öffentliche Einrichtungen, Schulen u.a.

Abmessungen:

26 x 11 cm (B x H)

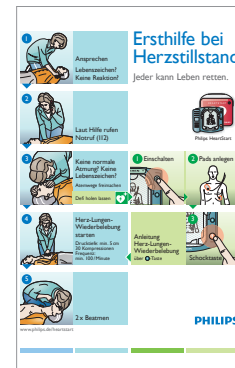

AED-Poster

Bitte wenden Sie sich an Ihren Philips Vertriebspartner.

Das Poster bietet Ihnen eine Übersicht der wichtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen und zeigt auch den Einsatz eines Defibrillators. Sie können es neben einem Defibrillator anbringen, aber auch in Bereichen, in denen kein AED vorhanden ist, wie z.B. in Pausen- oder Umkleieräumen. So können sich Mitarbeiter oder andere Personen jederzeit die Notfall-Maßnahmen ansehen und verinnerlichen.



AED-Hinweisschilder

Produktnummer 989803170921 (rot)

Produktnummer 989803170931 (grün/DIN)

Mit einem AED-Hinweisschild über der Wandhalterung oder dem Defibrillatorschrank wird der Defibrillator noch besser wahrgenommen. Das Schild kann zur Optimierung der Sichtbarkeit auf drei verschiedene Arten angebracht werden: T-förmig, V-förmig oder an Ecken.

Abmessungen der Ansichtsfläche:

23 x 15 cm (H x B)

Zur schnelleren Verständigung des Rettungsdienstes und der Verhinderung von Diebstahl bietet Philips drei verschiedene batteriebetriebene, alarmgesicherte Wandschränke. Das Basis-Schrankmodell verfügt über einen einfachen akustischen Alarm. Ebenfalls erhältlich sind zwei Premium-Schrankmodelle: Ein Geräteschrank für die Wandmontage und ein Einbau-Geräteschrank, der in einer Aussparung in der Wand für eine dezenteren Optik angebracht wird. Die Premium-Schrankmodelle verfügen über eine Kombination aus akustischem Alarm und blinkendem Alarm. Sie sind aus robustem, dickem Stahlblech gefertigt und bieten ausreichend Stauraum für optionales Zubehör. Der Alarm der Premium-Schrankmodelle kann außerdem mit Ihrem internen Sicherheitssystem verbunden werden, um eine koordiniertere Reaktion auf Notfälle zu ermöglichen.



Geräteschrank für die Wandmontage, Basismodell
Produktnummer 989803136531

Abmessungen:
42 x 38 x 15 cm (B x H x T)



Geräteschrank für die Wandmontage, Premiummodell
Produktnummer PFE7024D

Abmessungen:
41 x 57 x 15 cm (B x H x T)



Einbau-Geräteschrank, Premiummodell
Produktnummer PFE7023D

Abmessungen:
In die Wand eingelassener Teil des Schrankes
36 x 56 x 15 cm (B x H x T)

Auf der Wand befindlicher Teil des Schrankes
42 x 62 x 6 cm (B x H x T)

Weiteres Zubehör



SMART Pads II

Produktnummer 989803139261

Mit diesen Pads kann in Notfällen wertvolle Zeit gespart werden, da sie bei Erwachsenen, Kindern und Kleinkindern verwendet werden können. Dank der SMART Pads II entfallen zusätzliche Ausgaben für unterschiedliche Pads, die für den Einsatz bei den verschiedenen Patientengruppen benötigt werden. Diese bereits angeschlossenen Pads sind zusätzlich durch eine halbharte Pads-Box geschützt und verfügen über einen HeartStart-kompatiblen Stecker (zur einfachen Übergabe an einen ACLS-Defibrillator von Philips bzw. einen Defibrillator eines anderen Herstellers mit Adapter). Bei Kindern/Kleinkindern (≤ 8 Jahre, ≤ 25 kg) sollte ein Kinderschlüssel verwendet werden, sofern vorhanden.



Langlebige Batterie

Produktnummer M5070A

Der FRx Defibrillator wird mit einer langlebigen Lithium-Mangandioxid-Batterie betrieben, deren Lebensdauer in der Lagerung fünf Jahre beträgt. Nach Installation hält die Batterie im Standby-Betrieb in der Regel vier Jahre. Für Defibrillatoren, die regelmäßig für Schulungen und/oder Vorführungen genutzt werden, sollten zusätzliche Batterien oder ein Trainingsgerät verwendet werden.



Notfall-Set

Produktnummer 68-PCHAT

Das Notfall-Set beinhaltet Hilfsmittel und Zubehörteile, die typischerweise für die Patientenversorgung und den Schutz des Ersthelfers benötigt werden: 2 Paar hypoallergene Nitrilhandschuhe, eine Taschenmaske, eine Verbandschere, einen Brusthaar-Rasierer und ein großes, besonders saugfähiges Papiertuch. Diese Gegenstände befinden sich in einem Reißverschlussbeutel, der am Griff der FRx Tasche befestigt werden kann.

Abmessungen:

24 x 14 cm (B x H)



Kinderschlüssel

Produktnummer 989803139311

Der spezielle Kinderschlüssel für den FRx Defibrillator kommt nur bei der Behandlung eines Kindes oder Kleinkindes unter 25 kg bzw. unter acht Jahren zum Einsatz. Sobald der Kinderschlüssel eingesteckt ist, reduziert der FRx die Defibrillationsenergie automatisch und passt Sprachanweisungen, visuelle Anleitungen und HLW-Unterstützung an die Behandlung von Kindern/Kleinkindern an. Abbildungen auf dem Schlüssel zeigen die richtige Platzierung der Pads bei Kleinkindern und Kindern.

HeartStart Adapter

Über den Philips HeartStart Adapter können die SMART Pads II auch an Geräte anderer Hersteller angeschlossen werden.



Fest angeschlossener Adapter

Abnehmbarer Adapter



Adapter-Modell 05-10000

Abnehmbarer Adapter für die Defibrillatoren Medtronic Physio-Control Quik-Combo LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 und 500.



Adapter-Modell 05-10100

Abnehmbarer Adapter für die Defibrillatoren Zoll 1200, 1400 und 1600 sowie für die Zoll Defibrillatoren der Serie M.

Schulungszubehör



Schulungs-Pads II

Produktnummer 989803139271

Die Schulungs-Pads II können mit dem HeartStart FRx oder dem HeartStart FRx Trainer an einer Übungspuppe verwendet werden, die an einen externen Übungspuppenadapter (M5089A) angeschlossen wird, oder auf einer Übungsmatte zur korrekten Pads-Platzierung (M5090A für Erwachsene; 989803139281 für Kleinkinder/Kinder). Bei Schulungen mit dem HeartStart FRx Defibrillator wird durch das Anschließen der Schulungs-Pads II der Schulungsbetrieb des FRx aktiviert und gleichzeitig die Schockabgabe blockiert.

Es stehen acht verschiedene Übungsszenarien zur Verfügung. Ein Set Schulungs-Pads II kann zudem für Schulungen zur Reanimation von Erwachsenen und Kleinkindern/Kindern* verwendet werden. Das Gerät erteilt die jeweils passenden Sprachanweisungen (einschließlich HLW-Anleitung).

Jede Box mit Schulungs-Pads enthält ein Paar wiederverwendbare selbsthaftende Pads mit integriertem Kabel und Stecker. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem eine Übungsmatte zur korrekten Pads-Platzierung bei Erwachsenen, eine illustrierte Anleitung für den Einsatz der Pads und eine Gebrauchsanweisung. Ebenfalls erhältlich sind Ersatz-Schulungs-Pads II (989803139291), die aus einem Set Pads mit Kabel und Stecker bestehen. Außerdem ist eine Übungsmatte zur korrekten Pads-Platzierung bei Kleinkindern/Kindern erhältlich (989803139281).



HeartStart FRx Trainer

Produktnummer 861306

Die Schulungsversion des HeartStart FRx Defibrillators beinhaltet einen Trainer, Schulungs-Pads II, eine Tragetasche, eine Gebrauchsanweisung, eine Kurzanleitung und einen externen Übungspuppenadapter. Der Trainer kann mit einer Übungspuppe mit einem internen (M5088A) oder externen (M5089A) Übungspuppenadapter verwendet werden.

Schulungsset für Übungsleiter

Produktnummer 989803139321

Produktnummer (nur DVD) 989803139341

Das Schulungsset beinhaltet eine DVD und eine CD mit Hilfsmaterial und Präsentationen für Schulungen, in denen die Teilnehmer in der Bedienung des HeartStart FRx Defibrillators unterwiesen werden. Die Schulungs-DVD ist auch separat erhältlich.



Kinderschlüssel

Produktnummer 989803139311

Der Kinderschlüssel kann während der Schulung zur Simulation der Therapie bei Kleinkindern/Kindern mit dem HeartStart FRx Trainer oder dem HeartStart FRx AED mit angeschlossenen Schulungs-Pads II verwendet werden.

* Für die Schulung in der Defibrillation bei Kleinkindern/Kindern muss der Kinderschlüssel (98980339311) eingesteckt sein.

Datenmanagement

Philips bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur effizienten und effektiven Konfiguration der HeartStart Defibrillatoren, zum anschließenden Herunterladen, Übertragen, Freigeben und Analysieren der Reanimationsdaten sowie zur Berichterstellung. Mit diesem Datenmaterial kann der ärztliche Leiter die Notfalleinsätze besser abstimmen. Mit der Event Review Software können die Defibrillatordaten effizient verwaltet werden – egal, ob Sie ein kommunales Programm für öffentlich zugängliche Defibrillatoren, ein AED-Programm in einer Schule, das Notfallteam in einem Unternehmen, ein Rettungsteam oder das Reanimationsteam Ihres Krankenhauses leiten.

Data Messenger

Produktnummer 861451 Opt. A01 –
Einzelplatzlizenz

Produktnummer 861451 Opt. A03 –
Standortlizenz

Mit dem HeartStart Data Messenger können Ereignisdaten vom Defibrillator dorthin übertragen werden, wo sie benötigt werden. Der Data Manager eignet sich ideal für Feuerwehren und Rettungsdienste, die Ereignisdaten für eine retrospektive Analyse mittels Event Review oder Event Review Pro vom AED herunterladen und an einen zentralen Datenverwalter oder medizinischen Leiter weiterleiten möchten. Der Data Messenger kann so konfiguriert werden, dass er automatisch im Hintergrund ausgeführt wird. Er kann aber auch als einfacher Assistent konfiguriert werden, der den Anwender Schritt für Schritt durch das Herunterladen, Anzeigen und Weiterleiten der Ereignisdaten führt.

Event Review

Produktnummer 861489 Option A01 –
Einzelplatzlizenz

oder 861489 Option A02 –
Unternehmenslizenz

Event Review ermöglicht das Herunterladen von Patientendaten von einem Defibrillator, Anzeigen auf dem PC-Bildschirm, Einfügen von Kommentaren und die Eingabe von Informationen zur Ersten Hilfe oder zum Patientenzustand. Sie können den Fall in einer Datei oder Datenbank speichern und somit Ad-hoc-Fallabfragen durchführen oder Fallberichte erstellen. Die Software ist mit Einzelplatz- oder unbeschränkter Unternehmenslizenz erhältlich.

Event Review Pro

Produktnummer 861431 Option A01 –
Einzelplatzlizenz

Produktnummer 861431 Option A03 –
Standortlizenz

Event Review Pro ist unser umfangreiches Fallmanagement-Tool für Datenverwalter und medizinische Leiter mit hohen Anforderungen. Es bietet noch detailliertere Eingabeformulare, damit jeder Aspekt der Ereignisse festgehalten werden kann, z.B. detaillierte Reaktionszeiten, Eingriffe und Beobachtungen. Neben den einzelnen Fallberichten erhalten Sie Utstein-Berichte und grafische Darstellungen der Gesamtreaktionszeiten, damit Sie Ihre Leistungen noch effizienter verwalten können.

Infrarotdatenkabel

Produktnummer ACT-IR

Wenn das Infrarotdatenkabel an einen PC angeschlossen ist, auf dem HeartStart Data Messenger, Event Review, Event Review Pro oder Configure ausgeführt wird, kann darüber eine Verbindung zum FRx oder HS1 Defibrillator hergestellt werden. So können Sie die Einstellungen des Defibrillators verändern oder Ereignisdaten speichern, anzeigen und für die Berichterstellung herunterladen.



* Standardvorgaben dürfen nur von befugten Personen geändert werden. Für die gewerbliche Nutzung ist eine Ersteinweisung durch autorisierte Personen vor Ort gesetzlich erforderlich.

HeartStart Configure

Produktnummer 861487

Mit HeartStart Configure können die Einstellungen des FR3, FRx oder HS1 überprüft und geändert werden. Sie können die aktuellen Einstellungen des Defibrillators abrufen, diese auf die Standardvorgaben zurücksetzen oder einzelne Einstellungen gemäß den Anforderungen des medizinischen Leiters anpassen und auf den Defibrillator übertragen*. Zur effizienteren Verwaltung der Konfiguration von mehreren Defibrillatoren können die Werte in einer Datei gespeichert werden. Somit können Sie dieselben Einstellungen auf alle Ihre AEDs übertragen und die zulässigen Einstellungen protokollieren.

Hinweis: Die EKG-Anzeige ist zur Bestimmung des Grundrhythmus vorgesehen. Sie dient nicht zur Diagnose oder Befundung des ST-Segments.

Für die gewerbliche Nutzung ist eine
Ersteinweisung durch autorisierte
Personen vor Ort gesetzlich erforderlich.

Bitte besuchen Sie uns unter www.philips.com/healthcare



© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt
zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne
Ankündigung einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics.

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 89253 * APR 2013